

元栓を忘れ忘れていた!
気づいたら空っぽになっていた!
ポンペに引っかかって転倒事故!



医療安全をサポート

カルミアGは 酸素が少なくなるとアラーム音でお知らせします。
開栓時・閉栓時にも音を鳴らし、開栓確認・閉栓確認ができます。
小型軽量で、でっぱりが少なく、重心が安定します。
忙しい時ほど大事な酸素ポンペの医療安全を全力でサポートします。

見やすい！使いやすい！コンパクト！手間いらずの安全機構！

取り付けやすい

ハンドルグリップ

手になじむグリップ、位置合わせしやすい機構、少ない回転数によって、短時間で装着可能です。

一目でわかる

フローインジケータ

元栓が開いていること、残圧があること、流量が0でないことの3点をひと目で確認できます。

音で知らせる

酸素切れアラーム

酸素ポンペの残圧が約3MPaをきると音で知らせ、開栓時にもピッと鳴るので、開栓確認にもなります。

表示系が横並び

フローインジケータ+圧力計+設定流量

これで
解決!!



使いかたなどのご案内ページ

おもな製品仕様

圧力	一次圧力 2~19.6MPa 入力規格：W22-14	二次圧力 0.4MPa 以下
設定流量 (L/分)	G/15 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15	
	G/10 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	
寸法 / 重量	64 x 80 x 80 (mm) / 350 (g)	
製品届出番号	11B2X10035000003	
医療機器分類	機械器具 06 呼吸補助器 特定保守管理医療機器 一般医療機器 高圧ガスレギュレータ JMDN コード 35300000	

◆添付文書をお読みのうえ、医師の処方及び指示に従ってお使いください。◆本カタログの内容は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

製造販売業者 **武蔵医研株式会社**
埼玉県川口市上青木西1丁目9番19号
電話：048-424-3073

お問合せ先